

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA: REBOOTS GO X PANTS



REBOOTS **GO X**

ÚVODNÉ INFORMÁCIE

Tento návod obsahuje podrobné inštrukcie pre užívateľa zariadenia Reboots Go X. Ak máte akékoľvek doplňujúce otázky týkajúce sa použitia, príslušenstva alebo návrhy na zlepšenie, neváhajte nás kontaktovať!

Kontakt: Pavel Šimko, Mgr.
Showroom: All Sport – Zimná 7, Poprad
Tel.č.: +421 907 573 597
Instagram: @reboots_sk_cz_hu
Web: www.reboots.sk

PREDTÝM, AKO ZAČNETE

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte návod na obsluhu.
- Výrobok sa nesmie používať za určitých zdravotných podmienok.
- Pozorne sa oboznámte so zoznamom kontraindikácií na poslednej strane.

RIADIACA JEDNOTKA REBOOTS GO X



LED DISPLAY - PREHĽAD



LED indikátor svieti nepretržite **na zeleno**:

- Go X je pripravený na použitie
- Go X je pripojený k smartfónu

LED indikátor bliká **na zeleno**:

- Go X spúšťa požadovaný program



LED indikátor svieti nepretržite **na modro**:

- Go X je pripravený na prevádzku
- Go X hľadá pripojenie Bluetooth

Pozn: Go X môžete používať aj bez smartfónu s obmedzenou funkčnosťou



LED indikátor svieti nepretržite **na červeno**:

- Go X nie je pripravený

Pozn: pozrite kapitolu "Riešenie problémov" a v prípade potreby nás kontaktujte

KOMPRESOR/PUMPA - PREHĽAD

Tlačidlo nastavenia



Otočný zámok = twist-lock



FRONT – predná strana pumpy /kompresora/

- Na prednej strane sa nachádza tlačidlo nastavenia
- Tlačidlo nastavenia je potrebné len v servisných prípadoch (*pozri kapitolu Riešenie problémov*)

BACK – zadná strana pumpy /kompresora/

- Na zadnej strane sa nachádza tlačidlo Twist-lock = otočný zámok
- Ak potrebujete vymeniť kompresor, jednoducho ho odpojte od nohavíc otočením o 90° v protismere hodinových ručičiek
- Odpojte napájaciu prípojku stlačením kolíka na konektore a jemne vytiahnite

PROGRAMY REBOOTS GO X - PREHĽAD

MASÁŽNE PROGRAMY A-H:

Vzduchové komory Reboots Go X Pants na nafúkajú podľa zvoleného programu. Tým sa vytvára optimálna nepretržitá masáž tlakovou vlnou, čím sa dosiahne pocit uvoľnených a ľahkých nôh.

A	Intense Flow
B	Intense
C	Impulse
D	Flow
E	Switch
F	Double
G	Intense - Pulse
H	Intense - Double

A Intense Flow



B Intense



C Impulse



D Flow



E Switch



F Double



G Intense Pulse ★



H Intense Double



PRVÁ APLIKÁCIA – AKO SI OBLIEČŤ REBOOTS GO X PANTS



AKO NA TO

Najjednoduchší spôsob je navliecť si nohavice na zemi.

Zipsy rozopnite na úrovni chodidiel, potom si do nohavíc ľahnite a úplne zazipsujte, aby sa predišlo náhlemu roztvoreniu. Pas zaistíte pomocou suchých zipsov.

PRVÁ APLIKÁCIA REBOOTS GO X PANTS



1

PRIPOJTE RIADIACU JEDNOTKU REBOOTS GO X K NOHAVICIAM A KOMPRESOROM

Zapojte riadiacu jednotku Reboots Go X k nohaviciam tak, že ju zasuniete do úchytu na nohaviciach a otočíte o 90°. Ak ste všetko urobili správne, konektory na spodnej strane riadiacej jednotky Reboots Go X budú smerovať k pásu.

Teraz zasuňte konektor z pravej nohy do zásuvky "R", a konektor z ľavej nohy do "L".

Dbajte na správne pripojenie, inak sa môže stať, že riadiaca jednotka Go X bude nepoužiteľná.



2

ZAPNITE RIADIACU JEDNOTKU REBOOTS GO X

Zapnite riadiacu jednotku Go X stlačením "On-Off", kým nebudete počuť pípnutie.



3


STLAČTE ŠTART

Stlačte 'Start' a užívajte si masáž s Reboots Go X.

Všetky podrobné nastavenia môžete urobiť cez aplikáciu Reboots app v smartfóne. Podrobné informácie nájdete v kapitole *"Reboots app"*

Tip: Na ochranu pred znečistením odporúčame nosiť tenké bežecké nohavice alebo legíny. Reboots Go X úplne zazipsujte, aby ste zabránili náhlemu rozopnutiu.

MOŽNOSTI S MOBILNOU APLIKÁCIOU REBOOTS APP

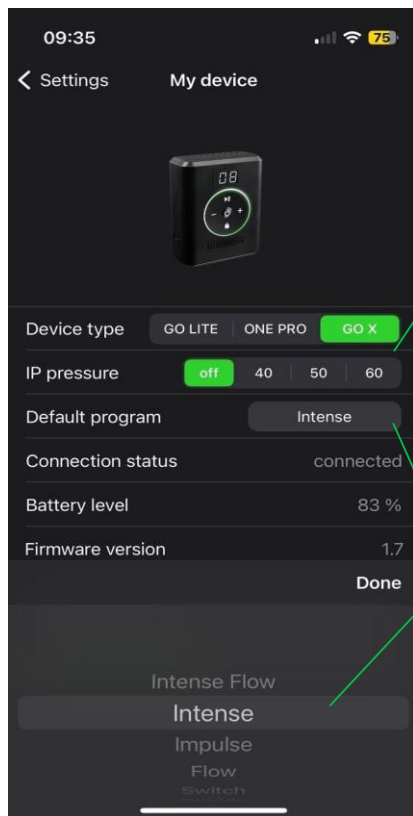


FUNKCIA: IP TLAK

- Pred začatím zvoleného programu/ sekvencie sa chceme uistiť, že Reboots Go X Pants sa čo najlepšie ergonomicky prispôbili nohám. Za týmto účelom sa všetky komory súčasne nafúknu vzduchom až do požadovanej úrovne tlaku 40, 50 alebo 60 mmHg. Následne sa spustí vami zvolený program /sekvencia. Funkcia je aktívna len raz - bezprostredne po spustení riadiacej jednotky a znovu až po opätovnom spustení zariadenia.
- Ak nechcete používať úvodnú fázu, môžete ju samozrejme deaktivovať.

PRIRADENIE PREDVOLENÉHO PROGRAMU K TLAČIDLU RÝCHLEHO SPUSTENIA

- Ak potrebujete rýchlo spustiť a používať Reboots Go X s obľúbeným programom Reboots bez telefónu, môžete ho vybrať zo zoznamu. Po reštartovaní riadiacej jednotky Reboots Go X sa Váš obľúbený program uloží a aktivuje sa hneď po stlačení tlačidla Start – aj bez smartfónu.

MOŽNOSTI S MOBILNOU APLIKÁCIOU REBOOTS APP

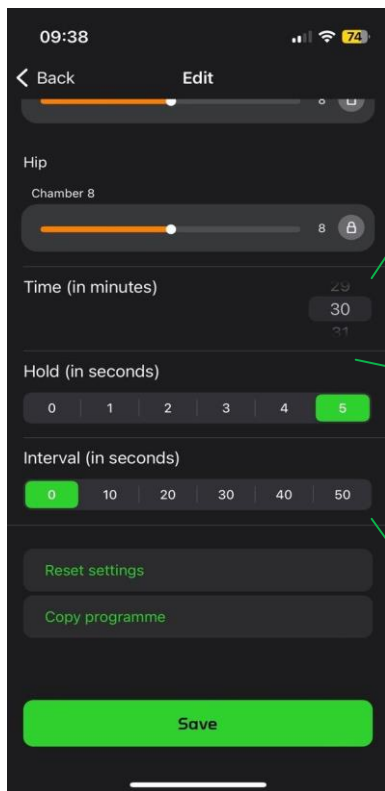

ČASOVAČ NASTAVENIA

- Vyberte dobu trvania programu (5 - 99min)

HOLD- SET TIMER / ČASOVAČ PODRŽANIA




- Udržiava cieľový tlak v aktívnej komore (komorách) na stanovený čas
- Časovač udržiavania tlaku sa spustí, keď sa dosiahne cieľový tlak v komore (komorách)
- Časový interval je možné nastaviť v rozsahu 0-5s v krokoch po 1s stlačením tlačidla

INTERVAL- SET TIMER / ČASOVAČ INTERVALU

- Nastavte si dobu pauzy medzi dvoma masážnymi intervalmi
- Časovač intervalu sa spustí po uplynutí časovača podržania poslednej komory (komôr) masážneho intervalu
- Stlačením tlačidla môžete nastaviť časový interval od 0 - 50s v krokoch po 10s

MOŽNOSTI S MOBILNOU APLIKÁCIOU REBOOTS APP

NASTAVTE SI INDIVIDUÁLNY CIEĽOVÝ TLAK PRE KAŽDÚ KOMORU

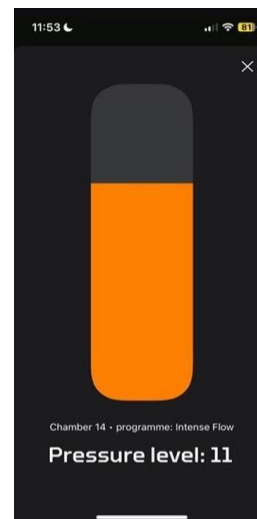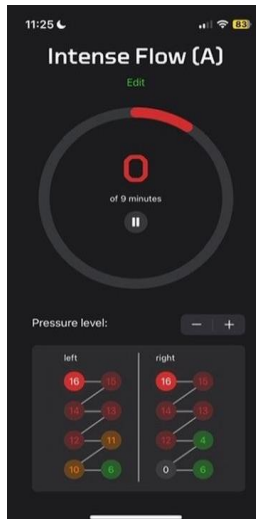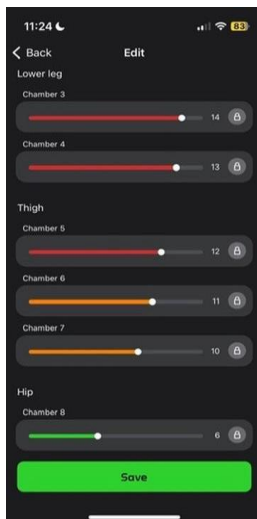

V PONUKE ÚPRAV /EDIT MENU

V každom programe môžete nastaviť tlak pre jednotlivú komoru pomocou horizontálneho posuvníka. Ak je symbol zámku zatvorený, nastavenia sa vzťahujú na príslušné komory na oboch nohách. Ak symbol zámku otvoríte, môžete nastaviť príslušnú komoru pre každú nohu zvlášť. Vaše nastavenia sa natrvalo uložia.

POČAS PROGRAMU

Ak ste už spustili program, môžete jednoducho zmeniť tlak v komorách tak, že sa dotknete príslušnej komory a zmeníte tlak pomocou vertikálneho posuvníka. Nastavenia sa po ukončení programu stratia.

Ak chcete nastavenia uložiť natrvalo, použite ponuku „Edit menu“ – Upraviť menu.

UKONČENIE PROGRAMU / SEKVENCIE

PROGRAM / SEKVENCIA SA UKONČIL AUTOMATICKY:

Po skončení cyklu sa kompresory vypnú a vypustia vzduch, aby ste mohli ukončiť program.

PROGRAM / SEKVENCIA BOL UKONČENÝ MANUÁLNE:

Ak ste aktuálny cyklus ukončili cez aplikáciu, tlačidlom Start-Pause alebo stlačením a podržaním tlačidla On-Off na riadiacej jednotke Reboots Go X, kompresory sa vypnú a uvoľnia vzduch, aby ste nohavice mohli vyzlieť.

PROGRAM / SEKVENCIA BOL POZASTAVENÝ MANUÁLNE:

Ak ste aktuálny cyklus pozastavili cez aplikáciu, alebo tlačidlom Start-Pause, vzduch zostane v komorách, kým neukončíte program v aplikácii alebo kým na riadiacej jednotke Reboots Go X nestlačíte a nepodržíte tlačidlo On-Off.

EXIT / UKONČENIE/:

Rozopnite suché zipsy na páse a následne aj zipsy na nohách – približne do úrovne členkov, aby ste sa pohodlne a jednoducho z nohavíc vyzliekli.

Potom nohavice Reboots Go X Pants roztvorte a ak po použití chcete rýchlo uvoľniť vzduch z komôr, oboma rukami ich zatlačte.

SKLADOVANIE:

Reboots Go X Pants voľne zložte k sebe. Postupujte podľa pokynov na skladovanie na ďalšej strane.

ČISTENIE:

Na čistenie Reboots Go X Pants postačí vlhká handrička s jemným čistiacim prostriedkom. Reboots Go X Pants nechajte dôkladne vyschnúť.

DEZINFEKCIA:

Na dezinfekciu RebootsGo X Pants sú vhodné bežne dostupné dezinfekčné prostriedky ako napr. Sanytol, resp. podobné výrobky s porovnateľným zložením.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

#1 REBOOTS GO X RIADIACA JEDNOTKA SA NEDÁ ZAPNÚŤ

Skontrolujte, či je batéria dostatočne nabitá. Na nabíjanie batérie použite priložený nabíjací kábel USB-C a nabíjačku. Počas nabíjania môžete samozrejme Reboots Go X používať.

#2 JEDNOTLIVÉ KOMORY SA NENAFÚKAJÚ, AJ KEĎ LED INDIKÁTOR STAVU SVIETI NA ZELENO

Skontrolujte, či ste v aplikácii deaktivovali jednotlivé komory. Ak nie, pokračujte podľa nasledujúceho postupu: uistite sa, že sú všetky pumpy (kompresory) správne pripojené ku komorám. Odopnite čierne servisné zipsy umiestnené vedľa hlavného zipsu na nohaviciach a skontrolujte ich napojenia. Kompresory (pumpy) sa dajú odpojiť a napojiť rovnakým spôsobom ako riadiaca jednotka Go X – pomocou otočného zámku /twist lock/.

#3 PORADIE KOMÔR SA NEZDHODUJE SO ZOBRAZENÍM V APLIKÁCII

Poradie kompresorov môže byť nesprávne naprogramované. Kontaktujte prosím náš zákaznícky servis. Problém s vami vyriešime telefonicky a/alebo prostredníctvom videa.

#4 LED INDIKÁTOR STAVU REBOOTS GO X SVIETI NEPRETRŽITE NA ČERVENO

Riadiaca jednotka Reboots Go X nerozpoznáva jednotlivé alebo všetky kompresory. Príčinou môže byť, že ste omylom zapojili káblkové prípojky nôh do konektorov nesprávnym smerom. To môže viesť k závažnej chybe v riadiacej jednotke Reboots Go X. V takomto prípade sa obráťte na náš zákaznícky servis.

#5 REBOOTS GO X RIADIACA JEDNOTKA KRÁTKO PÍPNE A ZRUŠÍ MASÁŽ

Reboots Go X riadiaca jednotka stratila spojenie Bluetooth so smartfónom. Ak sa to stane, masáž sa z bezpečnostných dôvodov preruší. Opätovne sa pripojte na Bluetooth a nechajte si smartfón pri sebe v okruhu cca. 5 m.

PRÍSLUŠENSTVO: ROZŠIROVACIE PÁSY PRE REBOOTS GO X



ROZŠIROVACIE PÁSY

Ak je obvod Reboots Go X Pants príliš malý, nohavice si nebudete môcť zapísať (alebo len veľmi ťažko). V takomto prípade môžete použiť rozširovacie pásy. Rozširovacie pásy sú k dispozícii v dvoch veľkostiach, takže zväčšenie obvodu môžeme vyriešiť veľmi individuálne.

ČO JE SÚČASŤOU BALENIA



Riadiaca jednotka



USB-C napájací kábel



Go X pants (S/M alebo L)



Pump unit = kompresor
(16 ks - predinštalované)

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet programov	8
Počet komôr	8
Hmotnosť [v kg]	~5
Výkon [v W]	45
Sieťová frekvencia [v Hz]	50 / 60
Sieťové napätie [v V]	AC220-240
Nastavenie času [v min]	5-99
Kapacita pumpovania [v l/min]	2
Tlak [v mmHg]	30-180
Rozmery [v cm]	10 x 7,7 x 7,8
Trieda ochrany	IP21; II/ ☐
Teplotný rozsah [v °C] (prevádzka a skladovanie)	10 - 40
Vlhkosť [v %] (prevádzka a skladovanie)	30-85

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

Návod na obsluhu uchovávajte na bezpečnom mieste! Prístroj nerozoberajte. Opravy riadiacej jednotky môžu vykonávať len odborníci autorizovaní spoločnosťou Wellcosan GmbH, inak môže dôjsť k strate záruky. V prípade poškodenia jednotky vytiahnite sieťovú zástrčku a vypnite jednotku. Sieťovú zástrčku vytiahnite a vypnite aj v prípade, že jednotka prišla do kontaktu s vodou alebo inými kvapalinami. Prístroj nepoužívajte vo vlhkých miestnostiach. Uistite sa, že jednotka je bezpečne uložená. Zariadenie Reboots Go a najmä zabudovanú batériu nevystavujte nárazom. Jednotka nesmie byť počas prevádzky zakrytá inými predmetmi. Dbajte na to, aby sa hadice počas používania a skladovania neskrútili alebo nepretáčali. Prístroj uchovávajte mimo dosahu zdrojov tepla (napr. priame slnečné svetlo, radiátory a iné).

Ak prístroj nepoužívate, musí byť vypnutý. Jednotka sa sama vypne po 10 minútach nečinnosti. Keď sa prístroj nepoužíva a/alebo keď je batéria úplne nabitá, odpojte ho aj od elektrickej siete. Nikdy nestláčajte ani neprepichujte zabudovanú batériu. Zariadenie Reboots Go uchovávajte mimo dosahu detí alebo osôb, ktoré neboli poučené o jeho používaní.

ZÁRUKA

Na riadiacu jednotku poskytujeme záruku 24 mesiacov. V prípade poruchy môže byť potrebné zaslať jednotku na kontrolu. V takom prípade sa uistite, že prepravný kartón je vhodne vystlaný, aby sa zabránilo možnému poškodeniu pri preprave. Žiaľ, na závady, ktoré vznikli v dôsledku nesprávnej prepravy, nie je možné uplatniť záručné nároky. Záručné podmienky: Pokiaľ existuje zákonná povinnosť poskytnúť záruku, bude buď poskytnutá bezplatná výmena, alebo bude výrobcovi poskytnutá možnosť odstrániť závalu, s vylúčením práva na odstúpenie od zmluvy alebo jej skrátenie. Ak sa odstránenie závad napriek niekoľkým pokusom nepodarí alebo ak je aj náhradný prístroj chybný, za čo zodpovedá výrobca, zákazník má právo na odstúpenie od zmluvy alebo na zníženie ceny. Na záruku sa nevzťahujú chyby spôsobené násilným poškodením, nesprávnou prevádzkou, vonkajšou silou alebo úpravami a opravami tretích strán, ako sú chyby spôsobené nesprávnymi dimenzovanými alebo skratovanými poistkami alebo chyby spôsobené bežným opotrebovaním. Záručné podmienky: Nárok na záruku existuje len v spojení s originálnym dokladom o kúpe (faktúrou). Preto si doklad o kúpe uschovajte na bezpečnom mieste.

V prípade akýchkoľvek problémov alebo otázok ohľadom používania nás neváhajte kontaktovať na t.č. +421/ 907 573 597 alebo na pavel.simko@gmail.com.

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI

Reboots Recovery Tech by sa mal v ideálnom prípade používať len po konzultácii s lekárom. Možné kontraindikácie môžu zahŕňať: dekompenzované srdcové zlyhanie, poruchy srdcového výdaja s vodou v nohách, zápal ošetrovaných častí tela, známa alebo predpokladaná trombóza žíl dolných končatín, zápal žíl a tepien, gangréna, dermatitída, arterioskleróza alebo poruchy žilového obehu, otvorené, neošetrené alebo infikované rany a poranenia, pri bolestiach nôh, kožných léziách, akútnych zápaloch, zhubných nádoroch, pľúcnom edéme, hypertenzii, rozsiahlej tromboflebitíde, trombóze alebo podozrení na trombózu, erysipele, ťažkej nekontrolovanej hypertenzii, akútnej traume mäkkých tkanív končatín, neuropatii alebo okluzívnych procesoch v lymfatickom drenážnom systéme.

Upozornenie: Reboots Recovery Tech nie je zdravotnícka pomôcka. V prípade otázok sa obráťte na svojho lekára.

Batériu nabíjajte len pomocou priloženej nabíjačky.

VÝROBCA:

Wellcosan GmbH

Hauptstraße 27, 36381 Schlüchtern, Germany

Tel.: +49(0) 666 174 891 06

mail: hallo@reboots.de

web: www.reboots.com